

E-20A-H-O / E-20AJ-H-O Snelle Gebruikshandleiding

1. Functies van de knoppen



Mute-knop: Klik erop om de waarschuwing te dempen




Knop: Begin met de behandeling en pas apparaat instellingen aan



Ramp-knop: Druk erop voor het inschakelen van de verhogingsfunctie

2. Het Apparaat Instellen

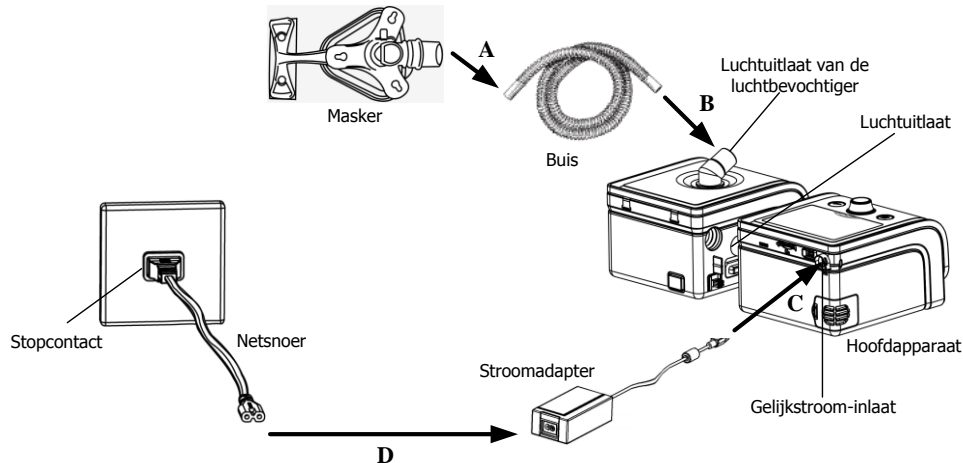

A. Sluit het ene uiteinde van de buis aan op het geassembleerde masker.

B. Sluit het andere uiteinde van de buis veilig aan op de luchtuitlaat van het hoofdapparaat of van de luchtbevochtiger, zoals aangegeven in de figuur hierboven.


C. Sluit de stroomadapter aan op de inlaat van de gelijkstroom van het hoofdapparaat.

D. Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.

E. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.


3. Aanpassen van de Apparaat instellingen

A. Nadat het apparaat is aangesloten op de stroom wordt het volgende hoofdmenu scherm weergegeven, getoond in de linker afbeelding hieronder (alleen van toepassing op E-20A-H-O), of het hoofdmenu wordt weergegeven in de rechter afbeelding hieronder (alleen van toepassing op E-20AJ-H-O).

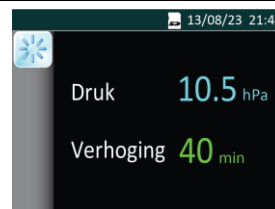


B. Vanuit het hoofdmenu, weergegeven hierboven, drukt u op **de Ramp-knop** en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Het scherm toont het initiële Instelmenu, zoals getoond in de onderstaande illustratie.



C. Druk op **de Knop**  voor toegang tot het Instelmenu, zoals getoond in de onderstaande illustratie.



13/08/23 21:45	
Luchtbevocht.	2
Verhog.tijd	10 min
Vertraging	Uit
Datum	2013-08-23
Tijd	21:45
Helderheid	Hoog
Maskertype	NM

D. Druk op **de Knop**  en draai de knop voor het aanpassen van een optie.





13/08/23 21:45	
Luchtbevocht.	3
Verhog.tijd	10 min
Vertraging	Uit
Datum	2013-08-23
Tijd	21:45
Helderheid	Hoog
Maskertype	NM

E. Druk op **de Knop**  voor het bevestigen van de aanpassing.




13/08/23 21:45	
Luchtbevocht.	3
Verhog.tijd	10 min
Vertraging	Uit
Datum	2013-08-23
Tijd	21:45
Helderheid	Hoog
Maskertype	NM

F. De cursor schakelt tussen de opties als u **de Knop**  draait. Verwijs naar stappen C-E voor het aanpassen van andere opties. Wanneer de cursor zich op de **Start** optie bevindt zoals aangetoond in het figuur hieronder drukt u op **de Knop**  voor het afsluiten van het Instelmenu.



13/08/23 21:45	
Helderheid	Hoog
Maskertype	NM
Bewerkingstijd	0 h
iCode	>
Over	>
< Terug	
< Start	

4. Starten van de behandeling

Nadat u klaar bent met het instellen van de Apparaat instellingen en u terugkeert naar het Hoofdmenu drukt u op **de Knop**  om te beginnen met de behandeling.

5. Belangrijke Tips

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik van de SpO₂ Kit en SD-kaart. Voordat u het apparaat gebruikt, lees de gehele gebruikershandleiding door en onthoudt alle informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gebruikt.